



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

HospiCare
Nitrilhandsker



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Pudderfri
Usteril
Blå
Mikroteksturerede fingerspidser
Med rullekant
Kan autoklaveres
Godkendt til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, klasse I og 89/686/EEC klasse I, kat. III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)
EN 374-2
EN 374-3 (Testmetoden anvendt til test af kemisk gennemtrængningstid som angivet i nederst i dette datablad)
EN 388 (0,0,0,0)
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:

Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Forpakning

100 stk. pr. æske (XXL 90 stk)
10x100 stk. pr. karton
48 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen	0,10 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,12 mm	(+/- 0,02)
Håndled	0,07 mm	(+/- 0,02)
Vægt medium	4,70 g	(+/- 0,4)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	290423	5-6	76	240
Small	3958	6-7	86	240
Medium	3959	7-8	98	240
Large	3960	8-9	107	240
Xlarge	3961	9-10	115	240
Xxlarge	3945	10-11	124	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Mikrobiologi
Penetration
Pudderrester
Virus penetration
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie og cytostatika gennemtrængning (se liste)

Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitrile	-
Titanium Dioxide	13463-67-7
Zinc oxide	1314-13-2
Svovl	7704-34-9
ZDBC	136-23-2
Ammonium	1336-21-6
Anti-oxidant	68610-51-5
Calcium Stearat	1592-23-0
Calcium Nitrate	10124-37-5
T2227 Blue	111-46-6
PL1508 Blue	147-14-8
Klorin	7782-50-5



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Kemikalie	CAS nummer	Gennemtrængningstid	Klasse
1,2 dichloroethaneHydroxyethyl methacrylate 97%		<1 min.	0
0.5M Iodine solution	7553-56-2	>480 min.	6
2-Hydroxyethyl methacrylate 97%		10 min.	2
2-Mercaptoethanole	60-24-2	3 min.	0
Acetonitrile >99 %	75-05-8	<1 min.	0
Acrylamide 40%	79-06-1	>480 min.	6
Ammoniak 25%		13 min.	1
Bacillol AF		<10 min.	0
Benzoyl Peroxide 2%		>240 min.	5
Bomix plus 1%		>480 min.	6
Brintoverilte 30%	7722-84-1	>480 min.	6
Citron syre 15%		>480 min.	6
Cyclohexane		7 min.	0
Cyclohexanol	108-93-0	107 min.	3
Dichloromethane >99%	75-09-2	<1 min.	0
Diethylamine	109-87-7	<1 min.	0
Diurethane dimethacrylate		320 min.	5
Dimozon pur 4%		>480 min.	6
Eddike syre 10%		241 min	5
Ethanol 70%	64-17-5	>480 min.	6
Ethanol 80%	64-17-5	11 min.	1
Ethidium bromid 1%	1239-45-5	>480 min.	6
Ethyl acetat >99%	141-78-6	<1 min.	0
Formaldehyde 35%	50-00-0	>480 min.	6
Formaldehyde 37% i Methanol 10%	50-00-0	>120 min	3
Formalin		406 min.	5
Formamide 40%	75-12-7	>480 min.	6
Fosforsyre 30%	7664-38-2	>480 min.	6
Glutaraldehyd 10%	111-30-8	>480 min	6
Hexane	110-54-3	>480 min.	6
Hydrogen peroxide 3%		>480 min.	6
Isopropanol	67-63-0	>480 min.	6
Kalium hydroxid 30%	1310-58-3	>480 min.	6
Klorhexidine 4%		>480 min.	6
Klorin 1.000 ppm		>480 min.	6
Kloroform		<1 min.	0
Kohrsalex ekstra 4%		>480 min.	6
Kohrsolin extra 0,5%		>480 min.	6
Kohrsolin FF 0,5%		>480 min.	6
Korsolex AF 1%		>480 min	6
Korsolex plus 3%		>480 min.	6
Methanol 5%	67-56-1	>480 min.	6



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Methyl Methacrylate		< 1 min.	0
Natrium carbonate 5%		>480 min.	6
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
n-heptane	142-82-5	<1 min.	0
n-propanol		4 min.	0
O-Xylene >99%	95-47-6	<1 min.	0
Peracetic syre 38%	79-21-0	6 min.	0
Perchlorsyre 70%		92 min.	3
Petroleum – destilleret		5 min.	0
Phenol 90%		9 min.	0
Povidone iodine 10%	25655-41-8	>480 min.	6
Saltpetersyre 10%	7697-37-2	>480 min.	6
Saltsyre 25%	7647-01-0	134 min.	4
Saltsyre 36%	7647-01-0	47 min.	2
Svovl syre 96%		7 min.	0
Sølvnitrat 10%	7761-88-8	>480 min	6
Toulene		<1 min.	0
Tri(ethylene glycol) dimethacrylate 95%		20 min.	1
Cytostatika			
5-Flourouracil – 50.000 ppm		>480 min.	6
Carmustine 3.300 ppm		96 min.	3
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm		>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Epirubincin 2.000 ppm		>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm		>480 min.	6
Mitoxantrone 2.000 ppm		>480 min.	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
Thio-Tepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Vincristine Sulfate 1.000 ppm		>480 min.	6
Antibiotika			
Cefuroxim 15.000 ppm		>480 min.	6
Dicloxacinil 10.000 ppm		>480 min.	6
Gentamicin 1.200 ppm		>480 min.	6
Testet iht EN374-3			



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290423, 3958-3961, 3945

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevareregodkendt ^{*4}	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges